


Instruktioner

Klamydia

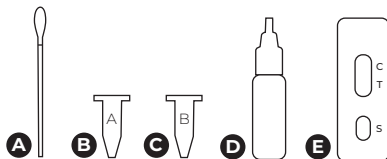

- 1) Ta ut topsen (A) och för in den 1-1,5 cm i urinröret/vaginan. Roterar topsen upprepade gånger. Låt den vara kvar i 5-10 sekunder.
- 2) Häll innehållet från den lilla blå behållaren märkt med "CT Diluent A" (B) i den stora behållaren "Sample Tube" (D).
- 3) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 2 minuter innan du tar bort den.
- 4) Häll innehållet från den lilla gula behållaren märkt med "CT Diluent B" (C) i den stora behållaren "Sample Tube".
- 5) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" igen och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 1 minut innan du tar bort den och sätter på locket på "Sample Tube".
- 6) Ta fram kassetten (E) och droppa 3 droppar från "Sample Tube" i det runda hålet märkt "S" på kassetten. Vänta och läs av resultatet efter 15 minuter.



Positivt



Negativt



Ogiltigt